

ایمنی در برابر ابزار و پسماند تیز و برنده

پل ایده آل پارس
Pole Ideal Pars Co.



وسایل تیز و برنده‌ی استفاده شده در مراکز درمانی، جز، پسماندهای خطرناک محسوب می‌شوند. چنانچه این وسایل به درستی دفع نشوند، می‌توانند باعث ایجاد جراحت و عفونت در دیگران شوند. با دفع صحیح وسایل تیز و برنده در سیفتی‌باکس‌ها، از خود و دیگران در برابر خطرات احتمالی محافظت کنید.

✓ YES



همیشه



- همیشه پس از استفاده از سوزن یا دیگر وسایل تیز، فوراً آن‌ها را درون سیفتی‌باکس دفع نمایید.
- سیفتی‌باکس را تنها تا خط **حداکثر ظرفیت** آن پر نمایید و از آن عبور نکنید.

✗ NO



هرگز



- در هنگام دفع، سوزن را مجدد در پوش گذاری نکنید.
- چنانچه در جایی به درپوش گذاری مجدد سوزن نیاز بود، از تکنیک **درپوش گذاری بایک دست** استفاده نمایید.
- هرگز برای درپوش گذاری مجدد، سوزن را در یک دست و پوشش را در دست دیگر نگه ندارید.

چطور می‌توان در برابر جراحات ناشی از ابزار تیز و برنده در امان بود؟

- چنانچه جایگزینی مطمئن و مناسبی به جای سوزن وجود داشت، از آن استفاده نمایید.
- ابزارها و وسایلی را برای استفاده انتخاب نمایید که به منظور کاهش خطر جراحات ناشی از ابزار تیز و برنده، ایمن شده‌اند.
- از درپوش گذاری مجدد سوزن‌ها بپرهیزید.
- برای استفاده ایمن و دفع صحیح ابزارهای تیز برنامہ داشته باشید.
- تمام جراحات ناشی از ابزارهای تیز و برنده را فوراً گزارش دهید تا مراقبت‌های پزشکی مناسب را دریافت نمایید.
- در صورت امکان، به جای تجهیزات شیشه‌ای از نمونه‌های پلاستیکی آن استفاده نمایید.
- حتماً دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به کار با ابزارهای تیز را مطالعه فرمایید.

دستورالعمل استفاده از
ابزارهای تیز و برنده

ایمنی در
آزمایشگاه