

لگن بهداشتی بیمار P.I.P. the bedpan



شرکت بل ایده آل پارس

www.medpip.com

راهنمای استفاده از لگن بیمار P.I.P.

مزایای پزشکی

ایمنی در درمان

راحتی و آسایش بیشتر

برای بیماران شما

حفظ نیروی انسانی

پرستل شما

کاهش هزینه

برای موسسه شما

خریدار محترم

خرید لگن بیمار P.I.P. یک تصمیم فوق العاده از جانب شما بوده است، زیرا این وسیله باعث راحتی و آرامش بیمار می شود و فشار کاری و روانی بسیاری را از روی دوش پرستاران بر می دارد. ارگونومی، بهداشت، ایمنی و سهولت در استفاده، از مهمترین نکاتی هستند که ما در طراحی این وسیله به آن ها توجه کرده ایم.

از دیگر ویژگی های مهم لگن بیمار P.I.P. پنهان نگهداشتن حریم های شخصی افراد از دید دیگران است.



با استفاده از دستگیره‌های موجود در بغل و عقب وسیله، لگن را به درستی زیر بیمار قرار دهید.



در مواردی که بیمار این توانایی را دارد که خودش به طرفین بغلتد و یا پشت خود را از روی تخت بلند کند، یک پرستار می‌تواند با توجه به دستورالعمل ذیل، لگن را زیر بیمار قرار دهد. اما در شرایط دیگر، معمولاً به کمک فرد دیگری هم نیاز است.

نحوه‌ی استفاده

قبل از استفاده

- لگن بیمار P.I.P. را نزدیک بیمار بیاورید.
- پوشش (سریوش) تناسلی لگن را از وسیله جدا نمایید.
- سریوش لگن را بردارید.
- بیمار را بر روی لگن قرار دهید.
- پوشش (سریوش) تناسلی را بر روی لگن نصب نمایید.

سریوش تناسلی را بر روی لگن قرار دهید سپس آن را به سمت بیمار بچرخانید.



بعد از استفاده

- سریوش تناسلی لگن را از وسیله جدا نمایید.
- لگن را از زیر بیمار بردارید.
- پشت بیمار را تمیز کنید.
- سریوش لگن را بر روی وسیله قرار دهید.
- پوشش (سریوش) تناسلی را بر روی لگن نصب نمایید.

بیمار می‌تواند با استفاده از دستگیره‌های کناری لگن بیمار P.I.P. موقعیت خودش را بر روی لگن تنظیم نماید.

دستگیره‌های موجود در کناره‌های لگن را به بیمار نشان دهید.



■ سریوش تناسلی فقط جهت راحتی و تمیزی بیشتر تعبیه شده است. در صورتی که بیمار احساس ناراحتی کرد می‌توانید از این سریوش استفاده نکنید.

استفاده جانبی

1 بیمار را به آرامی بچرخانید و با دست او را نگه دارید



2 لگن بیمار P.I.P. را به پهلو (به صورت کج) نگه دارید، و قسمت مسطح آن را زیر بیمار قرار دهید

بیماران مرد و زن، می توانند از لگن بیمار P.I.P. هم برای دفع مدفوع و هم برای دفع ادرار استفاده نمایند.

برای استفاده‌ی جانبی (از طرفین)؛ ابتدا بیمار باید به پشت دراز بکشد، سپس به سمت پرستار یا بالعکس بگنجد. لگن بیمار P.I.P. از پشت نیز به راحتی قابل استفاده است.

استفاده از پشت

1 به بیمار کمک کنید که پشتش را بلند کند.


2 لگن بیمار P.I.P. را زیر بیمار قرار دهید، سپس پاهای او را دراز کنید.

یا

1 بیمار را با بدن خود نگه دارید

2 لگن بیمار P.I.P. را به پهلو (به صورت کج) نگه دارید، و قسمت مسطح آن را زیر بیمار قرار دهید

بیمار باید به گونه ای بر روی لگن بیمار P.I.P. قرار بگیرد که استخوان خاجی (ساکروم)، بر روی نقش ساکروم موجود بر روی لگن بیمار P.I.P. منطبق شود. ▶ (مطابق شکل)

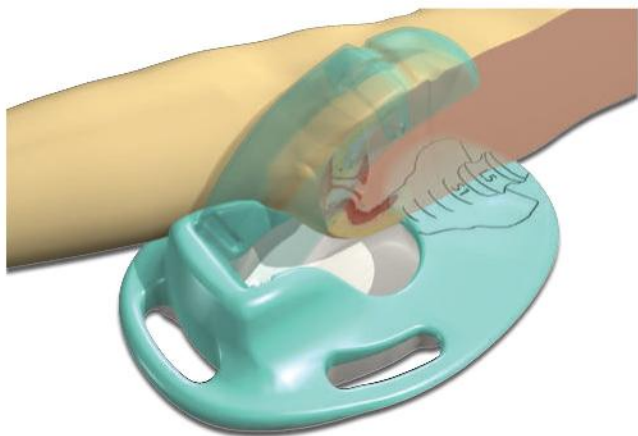


قابل شستشو تا دمای ۱۱۰°C



شستشو و ضدعفونی کردن

لگن بیمار P.I.P را توسط دستگاه‌های شوینده و یا به صورت غیر ماشینی تمیز نمایید. همچنین می‌توانید این لگن‌ها را با استفاده از روش‌های اتوکلاو و شیمیایی ضدعفونی کنید.

لگن بهداشتی P.I.P از قطعات مجزاً تشکیل شده و به گونه‌ای طراحی شده است که می‌توان در داخل آن کیسه پلاستیکی با سایز مناسب قرار داد و محتویات داخل آن را به راحتی دفع نمود.

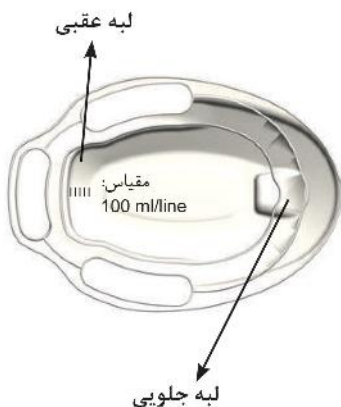

نگهداری

● لگن بیمار P.I.P را برای مدت زمان طولانی در برابر اشعه‌ی فرابنفش (UV نور خورشید) قرار ندهید.
● از لگن P.I.P در دمای کمتر از ۱۲ درجه سانتیگراد استفاده نکنید.

محتویات داخل جعبه

- ۱ عدد لگن بیمار بهداشتی P.I.P
- ۱ عدد راهنمای استفاده
- ۱ عدد CD آموزش استفاده از لگن بیمار بهداشتی P.I.P

سریوش تناسلی



سریوش لگن



رویه لگن



مخزن لگن



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب،
خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۱ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵
تلفن: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱