


Cd

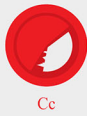


Cc

دستورالعمل نحوه مونتاژ و استفاده از سیفتی پاکس



Rb

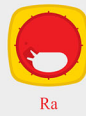

Ra

آماده سازی جهت استفاده، مدل های Cc و Cd

۱. درب قرمز رنگ را با زاویه ۳۰ درجه نسبت به لبه مخزن زرد رنگ نگه داشته (تصویر)، با انگشت شست بروی نقطه نمایی فشار آورید. (تصویر ۲)

۲. درب قرمز رنگ را روی مخزن زرد رنگ با انگشت شست با یک دست در جهت خلاف عقربه های ساعت فشار داده تا صدای قفل شدن زبانه ها شنیده شود. این عمل را تا بسته شدن کامل درب ادامه دهید. (تصویر ۳)



توجه: در مرحله ۳ برای مدل های Cc12 و Cc7 لیتری استفاده از کف دست (تصویر ۳ب) و برای سایر مدل ها فشار با دو انگشت شست پیشنهاد می شود. (تصویر ۳ا)

آماده سازی جهت استفاده، مدل های Ra

درب را در راستای مخزن و به صورت عمود (تصویر ۱) بروی مخزن قرار داده (تصویر ۲) و چهار طرف آن را تا شنیدن صدای (کلیک) فشار دهید. (تصویر ۳)



روش استفاده سیفتی پاکس مدل Ra

الف نحوه استفاده از این مدل درب همانند روش استفاده سیفتی پاکس مدل Cc می باشد. (تصویر تا ۴)
ب) این مدل دارای ضامن اطمینان می باشد. (تصویر ۵)



جهت بستن کامل درب و حداکثر آب بندی باید ضامن آبی رنگ در محل خود قرار گیرد.



۵. ضامن اطمینان

روش استفاده سیفتی پاکس مدل Cc


۱. برای جداسازی انواع سرسوزن ها از شیارهای مناسب تعبیه شده استفاده شود.
۲. درب چرخان (متحرک) دارای قفل دو مرحله ای موقت و دائم می باشد.
۳. به منظور جلوگیری از خروج پسماندها قبل از بردن کامل مخزن تا حداکثر حجم مشخص شده، درب چرخان را طبق تصویر ۲ در حالت موقت، تا زمان شنیدن صدای (کلیک) بچرخانید.
۴. پس از بردن مخزن تا حداکثر حجم مشخص شده به منظور غیرقابل استفاده نمودن سیفتی پاکس، درب چرخان را طبق تصویر ۴ در حالت بستن دائم بچرخانید تا صدای دومین (کلیک) شنیده شود.



۱. باز ۲. نیمه باز ۳. بستن موقت ۴. بستن دائم

روش استفاده سیفتی پاکس مدل Cd

۱. برای جداسازی انواع سرسوزن ها از شیارهای مناسب تعبیه شده استفاده نمایند.
۲. برای جلوگیری از بیرون ریزی پسماندها قبل از بردن ظرف، درپوش را در حد پوشاندن دهانه بچرخانید.
۳. پس از بردن ظرف تا حداکثر حجم مشخص شده، دهانه را تا انتها بچرخانید تا درپوش زرد مقابل سوخا قرار گیرد.
۴. جهت بستن دائم درب، روی دو نشانه با انگشت فشار دهید تا بصورت دائمی بسته شود. برای حداکثر آب بندی تمام نقاط را طبق نمونه فشار دهید. (۴a و ۴b و ۴c)

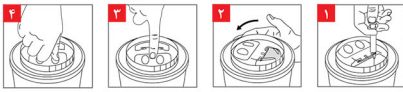

آماده سازی جهت استفاده، مدل های Rb

الف) لولاهای درب اصلی را با لولاهای بدنه منطبق نموده، تا شنیده شدن صدای (کلیک)) فشار دهید. (تصویر ۱) در این حالت به منظور دفع زباله های بزرگ می توان درب ظرف را کاملاً باز و در پشت مخزن قرار داد. (تصویر ۲)

ب) می توانید درب ظرف را مطابق شکل بسته، آنگاه لولای درب مجدداً به گونه ای که از لولای بدنه خارج شود، (برعکس مرحله الف) فشار دهید. از قسمت کنار لولای بطوریکه کلیه خارهای کناری درب، در داخل شیارهای تعبیه شده روی بدنه قرار گیرند. فشار دهید. (تصویر ۳)



روش استفاده سیفتی پاکس مدل Ra

الف) به منظور جلوگیری از خروج پسماندها، درب مدور را در محل خود نصب نموده تا مرحله بستن موقت بچرخانید. با چرخاندن برخلاف جهت عقربه های ساعت امکان باز نمودن مجدد درب مدور وجود دارد.
ب) پس از بردن ظرف تا حد نشانه، درب مدور را تا مرحله بستن دائم بچرخانید.

