

## شرکت پل ایده آل پارس

تهران خیابان استاد مطهری ، بعد از خیابان مفتح ، خیابان جهانتاب ، خیابان نقدی ، پلاک ۱۲ ، طبقه اول

تلفن : ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ فکس : ۸۸۷۶۵۵۶۱

کد پستی : ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵-۹۴۸۳

### رفراکتومتر دستی

دامنه: 0-32

واحد: Sp.Gr. °Brix

تقسیم بندی: 0.001 \ 0.2

برای تعیین غلظت گاماگلوبولین در آغوز برای  
گوساله های جوان

تصحیح دمای خودکار (ATC)



استفاده از رفراکتومتر دستی بسیار آسان است: یک قطره از نمونه را روی منشور بریزید و نتیجه را از روی صفحه‌ی درجه بندی بخوانید.

رفراکتومترها جهت اندازه گیری دردمای (۲۰ درجه سانتی‌گراد- ۶۸ درجه فارنهایت) تنظیم و کالیبره شده اند. در مواردی استفاده نمایید. (ATC) که دمای نمونه با دمای گفته شده تفاوت دارد باید از مدل های دارای تعدیل اتوماتیک دما تمام رفراکتومترها دارای کانون قابل تنظیم، اعداد خوانا جهت وضوح بالا و پیچ تنظیم صفر جهت کالیبراسیون هستند. این محصول در جعبه به همراه پارچه، آچار پیچ گوشتی، پیپت، کیف جیبی و دستورات عمل چندزبانه ارائه می شود.